

easymoov6®

Pompe de nutrition entérale
pour utilisation ambulatoire




Value Life

Mise en place de la tubulure

Positionner le tube silicone de la tubulure autour du rotor en s'assurant que la cassette soit en face de son logement.

Pousser la cassette entre les deux plots noirs.

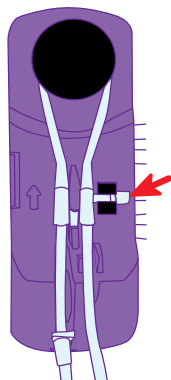

Guider verticalement les deux tubes face à leurs logements respectifs.

Fermer le capot puis mettre la butée de clipsage dans son logement.

Explication des symboles

Symboles de notification



: Indique que le mode verrouiller est actif



: Indique que le mode intermittent est actif



: Indique que le clavier est verrouillé



: Indique le niveau sonore



: Indique le niveau de batterie

11:09 : Indique l'heure

Symboles dans la partie centrale de l'écran



: Indique que la nutrition est en cours



: Indique que la pompe est en pause



: Débit programmé



: Volume programmé

Temps restant : Temps restant avant la fin de la nutrition


Vol. adm. : Volume déjà administré

Purge de la tubulure

Allumer la pompe et purger

Allumer la pompe en appuyant sur  et purger la tubulure en appuyant sur .


Déconnecter le patient et appuyer sur  pour purger.

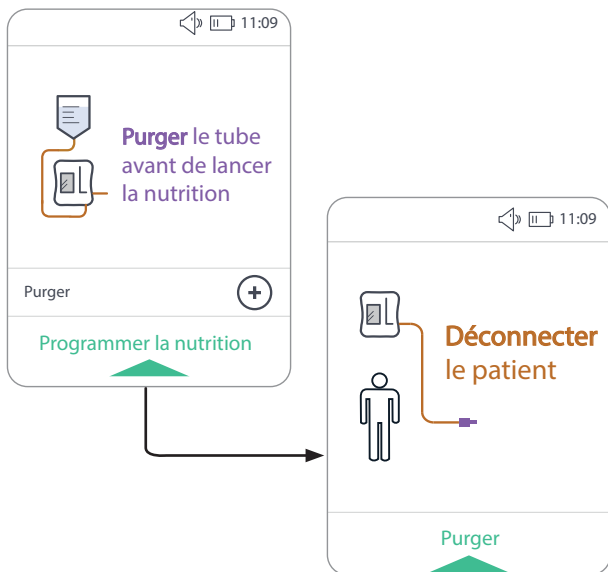

Purge de la tubulure

Vérifier la purge de la tubulure


Si nécessaire, relancer la purge en appuyant sur  ou programmer la nutrition en appuyant sur .

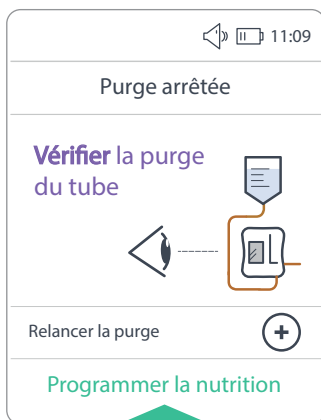

Programmation de la nutrition

Régler le débit


Appuyer sur ⊖ et ⊕ pour régler le débit (1 à 400ml/h)
puis appuyer sur ● pour valider.

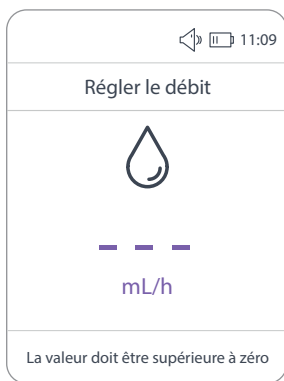

Programmation de la nutrition

Régler le volume

Appuyer sur **⊖** pour vider la poche ou sur **⊕** pour régler un volume (1 à 9999 ml). Puis, appuyer sur **●** pour valider.

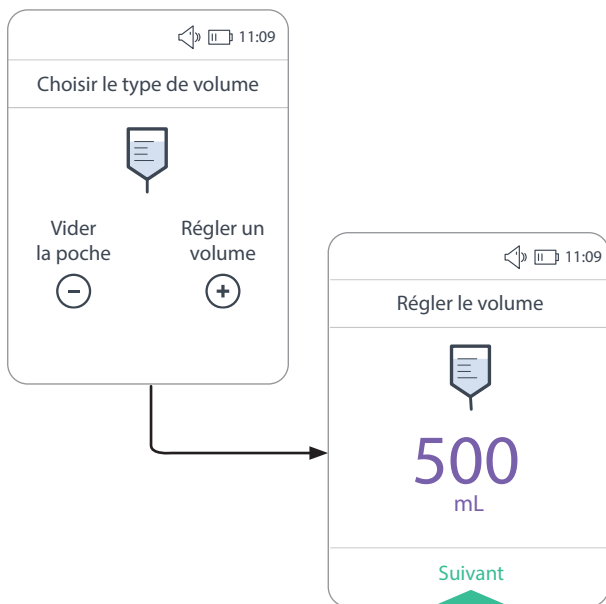

Programmation de la nutrition

Nutrition en cours

La nutrition est en cours. Appuyer et maintenir  pour mettre la pompe en pause. Le statut pause permet de changer le débit et le volume ou d'éteindre la pompe en appuyant sur .

  11:09

Nut. en cours 

 Débit	 Vol.
125 mL/h	500 mL
Temps restant	Vol. adm.
4 h 00 min	0 mL
Maintenir pour pause	

  11:09

Pause 

 Débit	 Vol.
125 mL/h	500 mL
Temps restant	Vol. adm.
4 h 00 min	0 mL
Changer débit ou vol. 	
Reprendre la nutrition	

Alarmes et actions correctives

Pour chaque message d'avertissement, suspendre d'abord l'alarme sonore en appuyant sur ●. Ensuite, lire le message sur l'écran et corriger l'erreur.

Appuyer sur ● pour continuer la nutrition.

Alarmes

Actions correctives



Vérifier le niveau de la poche ainsi que le positionnement de la tubulure. Déconnecter le tube du patient et lancer une purge. En cas de problème persistant, enlever et remettre la partie amont du tube.



Résoudre le problème d'occlusion en amont et s'assurer du bon positionnement de la tubulure. S'assurer de la propreté du capteur ultra-son.


Alarmes et actions correctives

Alarmes

Actions correctives

  11:09

Défaut tube aval

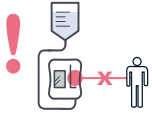

Vérifier occ. ou replacer tube

Suspendre alarme sonore

Résoudre le problème d'occlusion en aval et s'assurer du bon positionnement de la tubulure. S'assurer de la propreté du capteur infra-rouge et que la cassette ne soit pas pleine de nutriment.

  11:09

Défaut rotor



Vérifier tube
ou
Contacter SAV

Tél: 01 39 92 63 35
savfrance@vygon.com

Suspendre alarme sonore

Vérifier le positionnement de la tubulure autour du rotor (roue noire) et que rien ne le bloque.
Si le message persiste, contacter le service SAV.

  11:09

Défaut système



Contacter SAV

Tél: 01 39 92 63 35
savfrance@vygon.com

Suspendre alarme sonore

Nettoyer les plots noirs du capteur infrarouge, éteindre puis rallumer la pompe. Si le message persiste, contacter le service SAV.

Alarmes et actions correctives

Alarmes


Actions correctives



Contacter le service SAV.



Autonomie de batterie niveau faible,
30 minutes restantes. Brancher le
chargeur au secteur.

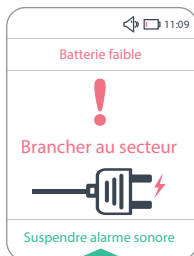

Autonomie 5 minutes.
Brancher le chargeur au secteur.

Informations techniques

Indications de nettoyage :

Avant toute opération de nettoyage, débrancher la pompe du secteur. Utiliser un chiffon doux imbibé de savon et d'eau pour nettoyer la pompe. Le nettoyage doit être effectué chaque jour ou lorsque cela est nécessaire.

Batterie :

Temps de chargement : 2h30

Autonomie : 20h à 125 ml/h

Mémoire :

Valeurs et modes spécifiques : 24h

Pour plus d'informations :

Pour plus d'informations, se référer au mode d'emploi.



Fabriqué par :

Medwin France

9 Allée de la vigne Grande

34600 Les Aires-FRANCE



1639

Distribué par :

Vygon

5 rue Adeline - 95440 ECOUEN - FRANCE

Customer service : +33 1 39 92 64 15

Service commercial France : +33 1 39 92 63 81

Fax : +33 1 39 90 29 37

www.vygon.com – questions@vygon.com